

MODE D'EMPLOI DE LA MONTRE GYNÉCOLOGIQUE

I. — CYCLE NORMAL ET RÉGULIER DE 28 JOURS ENVIRON

Vous Devez remonter la Montre en 2 Opérations successives.

Première Opération :

Dès l'Apparition de Vos Régles, ou au Début du 1^{er} Jour, Vous tirez légèrement par en haut le Bouton dit de Remontoir et Vous le tournez pour ramener l'Aiguille Trotteuse au Zéro ou à Midi ou au Jour 1. C'est un Mouvement très lent et Vous devrez actionner ce Bouton tournant 15 ou 20 fois de suite pour déplacer l'Aiguille et La mettre à l'Endroit voulu.

Deuxième Opération :

L'Aiguille ayant été mise au Zéro, Vous rabaissez avec douceur le Bouton et Vous remontez la Montre de la même manière que pour toute Autre Montre, jusqu'au moment Où Vous trouverez une petite Résistance.

A ce moment là, la Montre est en fonction. Vous n'avez plus qu'à attendre d'Elle les Renseignements qu'au fil des Jours du Mois Elle Vous apportera.

Mais **Ne pas oublier de remonter la Montre (2^{ème} Opération seulement) tous les Jours à la même heure**, sinon Elle s'arrêterait. Si pareille étourderie ou Oubli Vous arrivait, il Vous suffirait en faisant la 1^{ère} Opération indiquée plus haut de remettre la Trotteuse en face du Nombre de Jours écoulés pour Vous, depuis le Début des Régles de ce Cycle.

II. — CYCLE ANORMAL PLUS LONG DE 29 A 35 JOURS

Si le Cycle est de 29 Jours, Mettre au Départ l'Aiguille Trotteuse non pas à Zéro mais à Moins 1 (soit au chiffre du Cadran de la Montre 31)

S'il est de 30 Jours	à Moins 2 soit 30
S'il est de 31 Jours	à Moins 3 soit 29
S'il est de 32 Jours	à Moins 4 soit 28
S'il est de 33 Jours	à Moins 5 soit 27
S'il est de 34 Jours	à Moins 6 soit 26
S'il est de 35 Jours	à Moins 7 soit 25.

III. — CYCLE ANORMAL PLUS COURT DE 25 A 27 JOURS

Si le Cycle est de 27 Jours, Mettre au Départ l'Aiguille Trotteuse non pas à 24 mais à Plus 1 du Cadran de la Montre

S'il est de 26 Jours	à Plus 1 soit II
S'il est de 25 Jours	à Plus 2 soit III.

IV. — CYCLE IRRÉGULIER ET VARIABLE D'UN MOIS A L'AUTRE

Vous devez avant de placer l'Aiguille au Départ pour La mettre au point convenable faire un petit Calcul. Relever sur un Papier la Durée des 4 Cycles précédents. Vous en faites la Moyenne en additionnant les 4 Chiffres et en Divisant par 4.

Le Chiffre trouvé Vous donne la Durée Officielle du Cycle valable pour Votre Personne.

Même si vous faites une Erreur de Calcul ou si Votre Organisme a un Retard ou une Avance de 3 Jours, Vous serez en sécurité quant aux Renseignements fournis



BREVET D'INVENTION

- ① N° du procès verbal de dépôt 168.225 - Poste.
② Date de dépôt 16 septembre 1968, à 10 h 15 mn.
Date de l'arrêté de délivrance 13 avril 1971.
④ Date de publication de l'abrégé descriptif au
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. 21 mai 1971 (n° 20).
⑤ Classification internationale **A 61 b//G 04 b 19/00; G 06 c.**

④ **Montre gynécologique et de fécondation pour la femme.**

⑦ Invention de :

⑦ Déposant : BRIAND Henry, Yves, Marie, Joseph, résidant en France (Ille-et-Vilaine).

Mandataire :

⑩ Priorité conventionnelle :

⑩ ⑪ ⑫

La Présente Invention consiste en la Fabrication d'Une Montre dont le Cadran est divisé en 28 Jours et colorié de manière différente selon les Périodes du Cycle.

Les 4 Premiers Jours qui correspondent à la Période des Règles sont en 5 rouge ardent.

Les XIème, XIIème, XIIIème, XIVème, XVème, XVIème et XVIIème Jours du Cycle sont coloriés en Jaune et correspondent à la Période Fécondable.

Le XIVème Jour ou Jour de la Ponte Ovulaire est par conséquent le plus fécondable de Tous est colorié en Jaune orange pour mieux attirer l'attention.

10 Les Jours non fécondables et sans danger de Grossesse sont en blanc piqué de vert.

L'Aiguille est mise au zéro au début des Règles et se déplace par un Mouvement continu d'Horlogerie qui lui fait effectuer le Tour complet du Cadran en 28 Jours.

15 LE MECANISME D'HORLOGERIE est le même que Celui d'un Compteur ou d'une Montre ordinaire a une seule aiguille (Aiguille des Heures) mais avec un Rouage 672 fois plus lent. Le Ressort sera remonté tous les 28 Jours avec la Possibilité de remettre l'aiguille automatiquement au Zéro. Le Mouvement pourra être de nature électrique.

20 LE BOITIER DE LA MONTRE sera d'un Diamètre de 3 Centimètre à 3 Centimètres 1/2. Elle pourra être portée en Bracelet ou comme une Montre ordinaire pouvant être mise dans le Sac à mains ou de toute autre manière. Elle pourra être revêtue d'Un Couvercle mobile métallique tournant à volonté et laissant apparaître sous la vitre la Fraction de 2 à 3 Jours que l'aiguille aura parcourue. Un Volet fermera à volonté 25 l'Orifice de Visibilité ou un deuxième Couvercle opaque coiffera la Montre pour éviter toute Indiscrétion des Tiers.

CE SYSTEME pourra être appliqué à des Montres dont le Cadran comportera 24 Jours et 34 Jours et 28 Jours avec les Rouages correspondant.

RESUME

30 Montre Gynécologique dont le Cadran est colorié.

CADRAN



